


★血液検体の送付方法

1. 送付の際は、事前に臨床フローサイトメトリー・ラボにご連絡いただき、担当者と検体着日・検査内容をご確認下さい。
2. 検査依頼書を同封してください。（事前にメール・FAXでも可）
3. 検体が配送時の衝撃、ぶつかり合うなどして割れないように、梱包用ビニール等で包装してください。（写真1～3）
4. 発泡スチロールの箱や、緩衝材つき封筒に入れ、中で動かないよう新聞紙等で固定してください。（写真4.6）
5. 宅配便は可能であればヤマト運輸をご利用ください。伝票には「ワレモノ」にチェックしてください。着日は土日祝を避けてください（担当者にご相談ください）（写真5.7）

※通常は常温（18～22度*1）での配送ですが、猛暑日など、高温が予想される場合、保冷剤をご活用ください。



↑写真1（EDTA・ヘパリン）

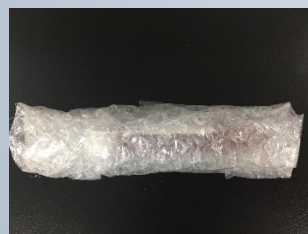

↑写真2




↑写真3



↑写真4



↑写真5

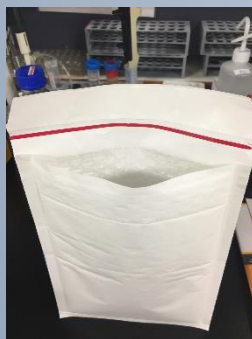

↑写真6



↑写真7



↑※

*1JCLLSIに準拠

★問い合わせ先（送付先）

IMSUT臨床フローサイトメトリー・ラボ
〒108-8639 東京都港区白金台4-6-1
東京大学医科学研究所 一号館東側地下
TEL:03-5449-5765 FAX:03-5449-5750
E-mail:clin-fcm@ims.u-Tokyo.ac.jp